

PhaSeal[®]

Instrucciones de uso

Un simple movimiento, una sujeción firme y una conexión de acceso fácil, hacen que PhaSeal[®] sea rápido y fácil de utilizar. Simplemente presionar-girar-presionar.

Conexiones simplificadas



Presionar

Presione el Inyector en el interfaz del Conector

Girar

Agarre la empuñadura y gire

Presionar

Presione hacia abajo para unir

Al desconectar, realice la acción contraria: tirar-girar-tirar.

! Es importante utilizar siempre jeringas de cono tipo Luer Lock.

PhaSeal[®]

Preparación del vial

A la jeringa...



1
Conectar.
Presionar-girar-presionar



2
Manteniendo el vial boca arriba insertar el diluyente o el aire en el vial.




3
Girar el sistema boca abajo y aspirar el medicamento




4
Desconectar.
Tirar-girar-tirar.


...a botella IV (mediante un conector en L)

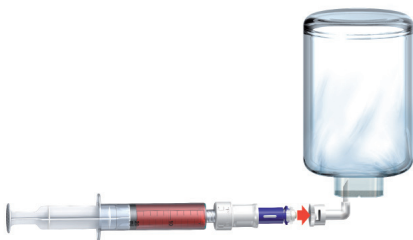

1
Conectar

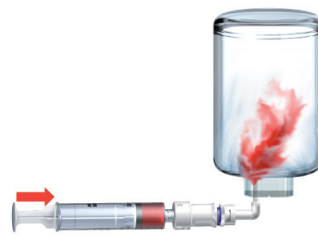

2
Cargar la botella

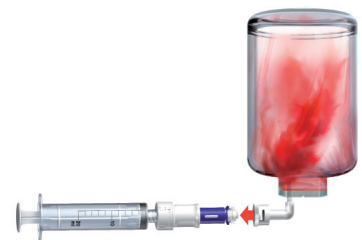

3
Desconectar

ⓘ Es importante haber purgado el sistema antes de introducir el citostático en la botella de suero para evitar el contacto con el tóxico durante el purgado.

...al paciente



1a
Desde la jeringa...



1b
...o desde la bolsa...



2
...al paciente a través del Conector



Videos explicativos de utilización de Phaseal[®] e instrucciones para la preparación de varios viales para una jeringa en www.uranovet.com