

Vexoderm[®]

¿cómo se utiliza?

Vexoderm[®] es un apósito muy moldeable, adaptable a distintas formas de heridas.

5 sencillos pasos para una correcta utilización:

1



Hidratación de la matriz.

Se añade en su totalidad el contenido del vial con solución hidratante. La matriz necesita 1-2 minutos para absorber toda la solución.

2



Limpiar la herida

Con suero salino fisiológico o Ringer Lactato. No utilizar otros tratamientos tópicos (antisépticos, antibióticos, etc.) en el lecho de la herida.

3



Colocar Vexoderm directamente sobre la herida.

Vexoderm debe estar en contacto directo con el lecho de la herida, cubriendo toda la zona afectada.

4



Cubrir con un apósito secundario *

Para fijarlo a la herida y conservar sus propiedades hidratantes necesita un apósito secundario, como una gasa parafinada o un film transparente.

5



Proteger con algodón y vendaje**

Se debe realizar un buen vendaje (algodón, esparadrapo, venda) para evitar la desecación de la herida y aportar protección física

*Un buen vendaje de protección es esencial para mantener la humedad y temperatura de la matriz.

** La herida puede desprender mal olor. Esto es algo normal en el proceso de cicatrización con cura húmeda que no es indicativo de que la herida esté infectada. Sin embargo, se recomienda advertir al propietario para no crear alarma.